



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2146371

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

03.04.2018 № 014-793/18
На № _____ от _____

О новых данных по безопасности
медицинских изделий,
регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2010/07932

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения государственной функции по мониторингу безопасности медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, доводит до сведения субъектов обращения медицинских изделий письмо ЗАО Компания «Бакстер», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия о новых данных по безопасности при использовании медицинского изделия «Аппарат для гемодиализа ARTIS с принадлежностями», производства «Гамбро Даско С.п.А», Италия, регистрационное удостоверение от 08.10.2010 № ФСЗ 2010/07932, срок действия не ограничен.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ЗАО Компания «Бакстер» (125171, Москва, Ленинградское ш., д. 16 А, стр. 1, тел. +7(495) 647-68-07).

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести мероприятия по проверке наличия указанного медицинского изделия и принятию мер, указанных в письме ЗАО Компания «Бакстер», о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

Уважаемый клиент!

Информация, касающаяся безопасности вовлеченных продуктов

Аппарат для гемодиализа ARTIS с принадлежностями, производства "Гамбро Даско С.п.А." Италия, регистрационное удостоверение: ФСЗ 2010/07932 от 08.10.2010

Описание проблемы

ЗАО Компания «Бакстер» поставляет «Аппарат для гемодиализа ARTIS с принадлежностями» производства "Гамбро Даско С.п.А." Италия. От компании "Гамбро Даско С.п.А." было получено уведомление о модификации крышек роторов обоих перистальтических насосов. Улучшена система крепления крышек, которая предохраняет их от повреждения при ручном снятии сегментов расходной системы. Для точной установки, с внутренней стороны крышек введена маркировка R и L. В обязательном порядке, новыми крышками обеспечиваются аппараты с опцией AFBK. Аппараты без данной опции, обеспечиваются новыми крышками при очередном сервисном обслуживании по согласованию с заказчиком.

Действия покупателя/пользователя

ЗАО Компания «Бакстер» в качестве предупредительной меры просит всех пользователей «Аппарата для гемодиализа ARTIS» (при наличии оборудования и готовности провести программу по модификации) обратиться в Сервисную службу Бакстер, заполнив прилагаемую форму заявки из Приложения №5 и отправив ее в ЗАО Компания «Бакстер» по факсу: +7 (495) 647 68 08 или в отсканированном виде по электронной почте: natalia_rybalko@baxter.com, ts_russia@baxter.com

Данные работы по модификации аппарата будут выполнены сервисным инженером Бакстер бесплатно для лечебных учреждений и пользователей.

ЗАО Компания «Бакстер» просит до 01 мая 2017 года заявку на выполнение данных работ, чтобы избежать получения повторных уведомлений.

Дополнительная информация и поддержка

До 01 июня 2017 ЗАО Компания «Бакстер» составит план выполнения программ модификации и проинформирует всех приславших заявки пользователей о датах визита инженера и обновления аппаратов.

Спасибо за ваше сотрудничество. При возникновении вопросов по данному уведомлению и модификации аппаратов, либо относительно других вопросов по техническому обслуживанию данных аппаратов или поставкам запчастей к ним необходимо обращаться в ЗАО Компания «Бакстер» по телефону +7 495 647 68 07 с 09.00 до 18.00 по московскому времени с понедельника по пятницу или отправив обращение на электронный адрес ts_russia@baxter.com

С уважением,
Старший менеджер по обеспечению качества
ЗАО Компания «Бакстер»



Н.Д. Рыбалко
07 марта 2017

Уважаемый клиент!

Информация, касающаяся безопасности вовлеченных продуктов

Аппарат для гемодиализа ARTIS с принадлежностями, производства "Гамбро Даско С.п.А." Италия, регистрационное удостоверение: ФСЗ 2010/07932 от 08.10.2010

Описание проблемы

ЗАО Компания «Бакстер» поставляет «Аппарат для гемодиализа ARTIS с принадлежностями» производства "Гамбро Даско С.п.А." Италия. От компании "Гамбро Даско С.п.А." было получено уведомление о необходимости замены электронной платы измерителя наработки в 6 аппаратах, поставленных в РФ. Вместо плат с версией разработки Rev. 05 были ошибочно установлены платы с версией Rev 04. Новая версия была разработана, чтобы продлить программируемый автозапуск аппарата до 168 часов (7 дней). В версии Rev. 04 автозапуск ограничивается 48 часами, как это было в предыдущей конфигурации.

Действия покупателя/пользователя

ЗАО Компания «Бакстер» в качестве предупредительной меры просит всех пользователей «Аппарата для гемодиализа ARTIS» (при наличии оборудования и готовности провести программу по модификации) обратиться в Сервисную службу Бакстер, заполнив прилагаемую форму заявки из Приложения №5 и отправив её в ЗАО Компания «Бакстер» по факсу: +7 (495) 647 68 08 или в отсканированном виде по электронной почте: natalia_rybalko@baxter.com, ts_russia@baxter.com

Данные работы по модификации аппарата будут выполнены сервисным инженером Бакстер бесплатно для лечебных учреждений и пользователей.

ЗАО Компания «Бакстер» просит до 01 мая 2017 года заявку на выполнение данных работ, чтобы избежать получения повторных уведомлений.

Дополнительная информация и поддержка

До 01 июня 2017 ЗАО Компания «Бакстер» составит план выполнения программ модификации и проинформирует всех приславших заявки пользователей о датах визита инженера и обновления аппаратов.

Спасибо за ваше сотрудничество. При возникновении вопросов по данному уведомлению и модификации аппаратов, либо относительно других вопросов по техническому обслуживанию данных аппаратов или поставкам запчастей к ним необходимо обращаться в ЗАО Компания «Бакстер» по телефону +7 495 647 68 07 с 09.00 до 18.00 по московскому времени с понедельника по пятницу или отправив обращение на электронный адрес ts_russia@baxter.com

С уважением,
Старший менеджер по обеспечению качества
ЗАО Компания «Бакстер»



Н.Д. Рыбалко
07 марта 2017

Уважаемый клиент!

Информация, касающаяся безопасности вовлеченных продуктов

Датчик содержания растворенных веществ в Аппарате для гемодиализа ARTIS с принадлежностями, производства "Гамбро Даско С.п.А." Италия, регистрационное удостоверение: ФСЗ 2010/07932 от 08.10.2010

Описание проблемы

ЗАО Компания «Бакстер» поставляет «Аппарат для гемодиализа ARTIS с принадлежностями» производства "Гамбро Даско С.п.А." Италия. От компании "Гамбро Даско С.п.А." было получено уведомление о необходимости замены блока питания на 16 аппаратах с конкретными серийными номерами, установленных на территории РФ, с целью избежать выхода из строя блока питания из-за перегрева конденсатора С5 на плате блока при длительном использовании. Данный конденсатор имеет лот поставки А2 и по этому признаку может быть идентифицирован инженером. Блок питания на таких аппаратах подлежит замене целиком.

Действия покупателя/пользователя

ЗАО Компания «Бакстер» в качестве предупредительной меры просит всех пользователей «Аппарата для гемодиализа ARTIS» (при наличии оборудования и готовности провести программу по модификации) обратиться в Сервисную службу Бакстер, заполнив прилагаемую форму заявки из Приложения №5 и отправив ее в ЗАО Компания «Бакстер» по факсу: +7 (495) 647 68 08 или в отсканированном виде по электронной почте: natalia_rybalko@baxter.com, ts_russia@baxter.com

Данные работы по модификации аппарата будут выполнены сервисным инженером Бакстер бесплатно для лечебных учреждений и пользователей.

ЗАО Компания «Бакстер» просит до 01 мая 2017 года заявку на выполнение данных работ, чтобы избежать получения повторных уведомлений.

Дополнительная информация и поддержка

До 01 июня 2017 ЗАО Компания «Бакстер» составит план выполнения программ модификации и проинформирует всех приславших заявки пользователей о датах визита инженера и обновления аппаратов. Спасибо за ваше сотрудничество! При возникновении вопросов по данному уведомлению и модификации аппаратов, либо относительно других вопросов по техническому обслуживанию данных аппаратов или поставкам запчастей к ним необходимо обращаться в ЗАО Компания «Бакстер» по телефону +7 495 647 68 07 с 09.00 до 18.00 по московскому времени с понедельника по пятницу или отправив обращение на электронный адрес ts_russia@baxter.com

С уважением,
Старший менеджер по обеспечению качества
ЗАО Компания «Бакстер»



Н.Д. Рыбалко
07 марта 2017

Уважаемый клиент!

Информация, касающаяся безопасности вовлеченных продуктов

Аппарат для гемодиализа ARTIS с принадлежностями, производства "Гамбро Даско С.п.А." Италия, регистрационное удостоверение: ФСЗ 2010/07932 от 08.10.2010

Описание проблемы

ЗАО Компания «Бакстер» поставляет «Аппарат для гемодиализа ARTIS с принадлежностями» производства "Гамбро Даско С.п.А." Италия. От компании "Гамбро Даско С.п.А." было получено уведомление о необходимости установки модернизированного датчика утечки жидкости на всех аппаратах, находящихся в эксплуатации в лечебных учреждениях. Новый датчик отличается большей надежностью и улучшает качество работы аппарата. Если старая модель состояла из нескольких деталей, то новая представляет собой единую литьевую форму, что исключает протечки жидкости из блока ультрафильтров при их замене.

Действия покупателя/пользователя

ЗАО Компания «Бакстер» в качестве предупредительной меры просит всех пользователей «Аппарата для гемодиализа ARTIS» (при наличии оборудования и готовности провести программу по модификации) обратиться в Сервисную службу Бакстер, заполнив прилагаемую форму заявки из Приложения №5 и отправив ее в ЗАО Компания «Бакстер» по факсу: +7 (495) 647 68 08 или в отсканированном виде по электронной почте: natalia_rybalko@baxter.com, ts_russia@baxter.com

Данные работы по модификации аппарата будут выполнены сервисным инженером Бакстер бесплатно для лечебных учреждений и пользователей.

До 01 июня 2017 ЗАО Компания «Бакстер» составит план выполнения программ модификации и проинформирует всех приславших заявки пользователей о датах визита инженера и обновления аппаратов.

Дополнительная информация и поддержка

До 01 июня 2017 ЗАО Компания «Бакстер» составит план выполнения программ модификации и проинформирует всех приславших заявки пользователей о датах визита инженера и обновления аппаратов.

Спасибо за ваше сотрудничество: При возникновении вопросов по данному уведомлению и модификации аппаратов, либо относительно других вопросов по техническому обслуживанию данных аппаратов или поставкам запчастей к ним необходимо обращаться в ЗАО Компания «Бакстер» по телефону +7 495 647 68 07 с 09.00 до 18.00 по московскому времени с понедельника по пятницу или отправив обращение на электронный адрес ts_russia@baxter.com

С уважением,
Старший менеджер по обеспечению
ЗАО Компания «Бакстер»



Н.Д. Рыбалко
07 марта 2017

Приложение 5.

Заявка на выполнение работ и контакты службы Технического сервиса

Baxter	«РАЙДОНСКИЕ КОЛЕСА» 2475 Калужская область, г. Раменское, ул. Мухоморова, д. 10	Имя и фамилия, должность	№ и дата
	ИМЕННОЕ ДОВОЗНОЕ ПОДЪЕЗНОЕ КОЛЕСО	ДОСЛЖИ	№ и дата

Заявка на выполнение работ

Сервисная служба ЗАО Компания «Бакстер»
125171, Россия, Москва, Ленинградское шоссе 16а, строение №1
Тел.: +7 (495) 647-68-07, Факс: +7 (495) 647-68-08
E-mail: ts_russia@baxter.com

Просим вас осуществить:

Гарантийный ремонт Ремонт Установку и ввод в эксплуатацию Плановое тех. обслуживание (ПТО) Другое _____

Наименование оборудования	Серийный номер	Дата установки/или начала эксплуатации	Собственник (организация или ФИО)	Дата последнего ПТО	Примечания

Работы необходимо выполнять в/для ЛПУ/организации:

Организация / ЛПУ	(Полное наименование)	
Адрес	(Страна, город, улица, дом, почтовый индекс)	
Контактное лицо	(ФИО, должность, телефон, электронная почта)	
Комментарии		

Информация для проведения ремонта:

Дата появления и описание неисправности		
Дезинфекция оборудования	<input type="checkbox"/> Оборудование очищено и дезинфицировано <input type="checkbox"/> Другое _____	
Источник сообщения неисправности	<input type="checkbox"/> Врач <input type="checkbox"/> Пациент <input type="checkbox"/> Медицинская сестра	<input type="checkbox"/> Клинический координатор Сотрудник ЗАО Компания «Бакстер» <input type="checkbox"/> Другое _____
На каком этапе возникла неисправность	<input type="checkbox"/> Перед запуском аппарата <input type="checkbox"/> Во время процедуры <input type="checkbox"/> После процедуры	
Появилась ли неисправность на пациента	<input type="checkbox"/> Не появилась <input type="checkbox"/> Госпитализация <input type="checkbox"/> Другое _____	
Были ли задействованы другие продукты	<input type="checkbox"/> Расходные материалы <input type="checkbox"/> Раствор <input type="checkbox"/> Другое _____	

Информация для проведения установки и ввода в эксплуатацию:

Номер договора	(Номер и дата договора о покупке или передаче оборудования)	
Планируемая дата выполнения работ		

Заявку заполнил:

Организация	Должность	ФИО	Телефон	E-mail	Дата	Подпись

© 2007 Baxter International Inc. Все права защищены. Baxter International Inc. является зарегистрированным производителем и владельцем товарных знаков Baxter и/или других торговых марок Baxter. Baxter International Inc. не несет ответственности за использование информации, содержащейся в данном документе, для целей, не предусмотренных Baxter International Inc.

Приложение 6.

Список серийных номеров аппаратов, подлежащих модернизации

№	Наименование аппарата	Серийный номер аппарата
1	ARTIS 230V	FX002486
2	ARTIS 230V	FX002541
3	ARTIS 230V	FX002542
4	ARTIS 230V	FX002545
5	ARTIS 230V	FX002547
6	ARTIS 230V	FX002609
7	ARTIS 230V	FX002610
8	ARTIS 230V	FX002614
9	ARTIS 230V	FX002697
10	ARTIS 230V	FX002701
11	ARTIS 230V	FX002702
12	ARTIS 230V	FX002703
13	ARTIS 230V	FX002705
14	ARTIS 230V	FX002749
15	ARTIS 230V	FX002753
16	ARTIS 230V	FX002786
17	ARTIS 230V	FX002795
18	ARTIS 230V	FX003162
19	ARTIS 230V	FX003176
20	ARTIS 230V	FX003199
21	ARTIS 230V	FX003209
22	ARTIS 230V	FX003253
23	ARTIS 230V	FX003513
24	ARTIS 230V	FX003613
25	ARTIS 230V	FX003742
26	ARTIS 230V	FX003743
27	ARTIS 230V	FX003765
28	ARTIS 230V	FX003767
29	ARTIS 230V	FX003782
30	ARTIS 230V	FX003783
31	ARTIS 230V	FX003784
32	ARTIS 230V	FX003785
33	ARTIS 230V	FX003798
34	ARTIS 230V	FX003799
35	ARTIS 230V	FX003800
36	ARTIS 230V	FX003801
37	ARTIS 230V	FX003802
38	ARTIS 230V	FX003803

№	Наименование аппарата	Серийный номер аппарата
200	ARTIS 230V	FX008268
201	ARTIS 230V	FX008270
202	ARTIS 230V	FX008272
203	ARTIS 230V	FX008273
204	ARTIS 230V	FX008287
205	ARTIS 230V	FX008293
206	ARTIS 230V	FX008308
207	ARTIS 230V	FX008542
208	ARTIS 230V	FX008547
209	ARTIS 230V	FX008548
210	ARTIS 230V	FX008550
211	ARTIS 230V	FX008552
212	ARTIS 230V	FX008553
213	ARTIS 230V	FX008557
214	ARTIS 230V	FX008560
215	ARTIS 230V	FX008564
216	ARTIS 230V	FX008578
217	ARTIS 230V	FX008637
218	ARTIS 230V	FX008638
219	ARTIS 230V	FX008639
220	ARTIS 230V	FX008640
221	ARTIS 230V	FX008641
222	ARTIS 230V	FX008642
223	ARTIS 230V	FX008643
224	ARTIS 230V	FX008647
225	ARTIS 230V	FX008648
226	ARTIS 230V	FX008649
227	ARTIS 230V	FX008653
228	ARTIS 230V	FX008654
229	ARTIS 230V	FX008676
230	ARTIS 230V	FX008679
231	ARTIS 230V	FX008680
232	ARTIS 230V	FX008682
233	ARTIS 230V	FX008683
234	ARTIS 230V	FX008684
235	ARTIS 230V	FX008687
236	ARTIS 230V	FX008689
237	ARTIS 230V	FX008691

№	Наименование аппарата	Серийный номер аппарата
399	ARTIS 230V	FX013034
400	ARTIS 230V	FX013035
401	ARTIS 230V	FX013039
402	ARTIS 230V	FX013040
403	ARTIS 230V	FX013042
404	ARTIS 230V	FX013043
405	ARTIS 230V	FX013065
406	ARTIS 230V	FX013070
407	ARTIS 230V	FX013071
408	ARTIS 230V	FX013073
409	ARTIS 230V	FX013074
410	ARTIS 230V	FX013078
411	ARTIS 230V	FX013080
412	ARTIS 230V	FX013082
413	ARTIS 230V	FX013083
414	ARTIS 230V	FX013084
415	ARTIS 230V	FX013085
416	ARTIS 230V	FX013086
417	ARTIS 230V	FX013087
418	ARTIS 230V	FX013137
419	ARTIS 230V	FX013157
420	ARTIS 230V	FX013160
421	ARTIS 230V	FX013168
422	ARTIS 230V	FX013190
423	ARTIS 230V	FX013191
424	ARTIS 230V	FX013192
425	ARTIS 230V	FX013196
426	ARTIS 230V	FX013197
427	ARTIS 230V	FX013201
428	ARTIS 230V	FX013204
429	ARTIS 230V	FX013205
430	ARTIS 230V	FX013207
431	ARTIS 230V	FX013213
432	ARTIS 230V	FX013384
433	ARTIS 230V	FX013389
434	ARTIS 230V	FX013392
435	ARTIS 230V	FX013394
436	ARTIS 230V	FX013399

Baxter

39	ARTIS 230V	FX003804
40	ARTIS 230V	FX003840
41	ARTIS 230V	FX003841
42	ARTIS 230V	FX003842
43	ARTIS 230V	FX003843
44	ARTIS 230V	FX003844
45	ARTIS 230V	FX003845
46	ARTIS 230V	FX003846
47	ARTIS 230V	FX003847
48	ARTIS 230V	FX003848
49	ARTIS 230V	FX003965
50	ARTIS 230V	FX003968
51	ARTIS 230V	FX004410
52	ARTIS 230V	FX004412
53	ARTIS 230V	FX004414
54	ARTIS 230V	FX004415
55	ARTIS 230V	FX004416
56	ARTIS 230V	FX004428
57	ARTIS 230V	FX004431
58	ARTIS 230V	FX005370
59	ARTIS 230V	FX005371
60	ARTIS 230V	FX005372
61	ARTIS 230V	FX005373
62	ARTIS 230V	FX005374
63	ARTIS 230V	FX005378
64	ARTIS 230V	FX005379
65	ARTIS 230V	FX005380
66	ARTIS 230V	FX005381
67	ARTIS 230V	FX005382
68	ARTIS 230V	FX005383
69	ARTIS 230V	FX005384
70	ARTIS 230V	FX005385
71	ARTIS 230V	FX005386
72	ARTIS 230V	FX005387
73	ARTIS 230V	FX005388
74	ARTIS 230V	FX005389
75	ARTIS 230V	FX005390
76	ARTIS 230V	FX005391
77	ARTIS 230V	FX005392
78	ARTIS 230V	FX005529
79	ARTIS 230V	FX005562
80	ARTIS 230V	FX005568
81	ARTIS 230V	FX005613
82	ARTIS 230V	FX005625
83	ARTIS 230V	FX005661

238	ARTIS 230V	FX008695
239	ARTIS 230V	FX008700
240	ARTIS 230V	FX008703
241	ARTIS 230V	FX008709
242	ARTIS 230V	FX008723
243	ARTIS 230V	FX008797
244	ARTIS 230V	FX008862
245	ARTIS 230V	FX008864
246	ARTIS 230V	FX008873
247	ARTIS 230V	FX009091
248	ARTIS 230V	FX009101
249	ARTIS 230V	FX009103
250	ARTIS 230V	FX009111
251	ARTIS 230V	FX009119
252	ARTIS 230V	FX009121
253	ARTIS 230V	FX009122
254	ARTIS 230V	FX009126
255	ARTIS 230V	FX009127
256	ARTIS 230V	FX009130
257	ARTIS 230V	FX009134
258	ARTIS 230V	FX009135
259	ARTIS 230V	FX009140
260	ARTIS 230V	FX009141
261	ARTIS 230V	FX009142
262	ARTIS 230V	FX009166
263	ARTIS 230V	FX009167
264	ARTIS 230V	FX009170
265	ARTIS 230V	FX009171
266	ARTIS 230V	FX009174
267	ARTIS 230V	FX009176
268	ARTIS 230V	FX009180
269	ARTIS 230V	FX009371
270	ARTIS 230V	FX009416
271	ARTIS 230V	FX009432
272	ARTIS 230V	FX009460
273	ARTIS 230V	FX009463
274	ARTIS 230V	FX009465
275	ARTIS 230V	FX009480
276	ARTIS 230V	FX009485
277	ARTIS 230V	FX009494
278	ARTIS 230V	FX009500
279	ARTIS 230V	FX009514
280	ARTIS 230V	FX009570
281	ARTIS 230V	FX009655
282	ARTIS 230V	FX009700

437	ARTIS 230V	FX013403
438	ARTIS 230V	FX013406
439	ARTIS 230V	FX013408
440	ARTIS 230V	FX013409
441	ARTIS 230V	FX013410
442	ARTIS 230V	FX013411
443	ARTIS 230V	FX013413
444	ARTIS 230V	FX013414
445	ARTIS 230V	FX013416
446	ARTIS 230V	FX013440
447	ARTIS 230V	FX013441
448	ARTIS 230V	FX013442
449	ARTIS 230V	FX013445
450	ARTIS 230V	FX013447
451	ARTIS 230V	FX013448
452	ARTIS 230V	FX013449
453	ARTIS 230V	FX013450
454	ARTIS 230V	FX013451
455	ARTIS 230V	FX013452
456	ARTIS 230V	FX013453
457	ARTIS 230V	FX013454
458	ARTIS 230V	FX013491
459	ARTIS 230V	FX013493
460	ARTIS 230V	FX013504
461	ARTIS 230V	FX013509
462	ARTIS 230V	FX013779
463	ARTIS 230V	FX014122
464	ARTIS 230V	FX015355
465	ARTIS 230V	FX015356
466	ARTIS 230V	FX015357
467	ARTIS 230V	FX015359
468	ARTIS 230V	FX015360

Baxter

84	ARTIS 230V	FX006030
85	ARTIS 230V	FX006066
86	ARTIS 230V	FX006311
87	ARTIS 230V	FX006314
88	ARTIS 230V	FX006331
89	ARTIS 230V	FX006410
90	ARTIS 230V	FX006714
91	ARTIS 230V	FX006809
92	ARTIS 230V	FX006813
93	ARTIS 230V	FX006844
94	ARTIS 230V	FX006849
95	ARTIS 230V	FX006852
96	ARTIS 230V	FX006856
97	ARTIS 230V	FX006857
98	ARTIS 230V	FX006858
99	ARTIS 230V	FX006865
100	ARTIS 230V	FX006874
101	ARTIS 230V	FX006881
102	ARTIS 230V	FX006883
103	ARTIS 230V	FX006884
104	ARTIS 230V	FX006885
105	ARTIS 230V	FX006887
106	ARTIS 230V	FX006889
107	ARTIS 230V	FX006924
108	ARTIS 230V	FX006926
109	ARTIS 230V	FX006927
110	ARTIS 230V	FX006930
111	ARTIS 230V	FX006934
112	ARTIS 230V	FX006943
113	ARTIS 230V	FX006948
114	ARTIS 230V	FX007109
115	ARTIS 230V	FX007116
116	ARTIS 230V	FX007122
117	ARTIS 230V	FX007123
118	ARTIS 230V	FX007556
119	ARTIS 230V	FX007557
120	ARTIS 230V	FX007558
121	ARTIS 230V	FX007559
122	ARTIS 230V	FX007560
123	ARTIS 230V	FX007561
124	ARTIS 230V	FX007562
125	ARTIS 230V	FX007563
126	ARTIS 230V	FX007564
127	ARTIS 230V	FX007633
128	ARTIS 230V	FX007634

283	ARTIS 230V	FX009703
284	ARTIS 230V	FX009713
285	ARTIS 230V	FX009714
286	ARTIS 230V	FX009717
287	ARTIS 230V	FX009728
288	ARTIS 230V	FX009731
289	ARTIS 230V	FX009734
290	ARTIS 230V	FX009737
291	ARTIS 230V	FX009738
292	ARTIS 230V	FX009773
293	ARTIS 230V	FX009776
294	ARTIS 230V	FX009778
295	ARTIS 230V	FX009780
296	ARTIS 230V	FX009788
297	ARTIS 230V	FX009789
298	ARTIS 230V	FX009804
299	ARTIS 230V	FX009805
300	ARTIS 230V	FX009807
301	ARTIS 230V	FX009814
302	ARTIS 230V	FX009816
303	ARTIS 230V	FX009818
304	ARTIS 230V	FX009824
305	ARTIS 230V	FX009827
306	ARTIS 230V	FX009829
307	ARTIS 230V	FX009830
308	ARTIS 230V	FX009831
309	ARTIS 230V	FX009833
310	ARTIS 230V	FX009834
311	ARTIS 230V	FX009841
312	ARTIS 230V	FX009912
313	ARTIS 230V	FX009920
314	ARTIS 230V	FX009925
315	ARTIS 230V	FX009926
316	ARTIS 230V	FX009929
317	ARTIS 230V	FX009979
318	ARTIS 230V	FX010016
319	ARTIS 230V	FX010039
320	ARTIS 230V	FX010134
321	ARTIS 230V	FX010149
322	ARTIS 230V	FX010505
323	ARTIS 230V	FX010546
324	ARTIS 230V	FX010551
325	ARTIS 230V	FX010573
326	ARTIS 230V	FX010575
327	ARTIS 230V	FX010576

129	ARTIS 230V	FX007636
130	ARTIS 230V	FX007637
131	ARTIS 230V	FX007638
132	ARTIS 230V	FX007639
133	ARTIS 230V	FX007640
134	ARTIS 230V	FX007643
135	ARTIS 230V	FX007644
136	ARTIS 230V	FX007645
137	ARTIS 230V	FX007672
138	ARTIS 230V	FX007673
139	ARTIS 230V	FX007676
140	ARTIS 230V	FX007677
141	ARTIS 230V	FX007678
142	ARTIS 230V	FX007679
143	ARTIS 230V	FX007680
144	ARTIS 230V	FX007681
145	ARTIS 230V	FX007684
146	ARTIS 230V	FX007685
147	ARTIS 230V	FX007686
148	ARTIS 230V	FX007687
149	ARTIS 230V	FX007691
150	ARTIS 230V	FX007692
151	ARTIS 230V	FX007698
152	ARTIS 230V	FX007699
153	ARTIS 230V	FX007868
154	ARTIS 230V	FX007877
155	ARTIS 230V	FX007880
156	ARTIS 230V	FX007888
157	ARTIS 230V	FX007891
158	ARTIS 230V	FX007895
159	ARTIS 230V	FX007896
160	ARTIS 230V	FX007897
161	ARTIS 230V	FX007899
162	ARTIS 230V	FX007900
163	ARTIS 230V	FX007901
164	ARTIS 230V	FX007902
165	ARTIS 230V	FX007903
166	ARTIS 230V	FX007908
167	ARTIS 230V	FX007921
168	ARTIS 230V	FX007924
169	ARTIS 230V	FX007927
170	ARTIS 230V	FX007935
171	ARTIS 230V	FX007938
172	ARTIS 230V	FX008133
173	ARTIS 230V	FX008146

328	ARTIS 230V	FX010577
329	ARTIS 230V	FX010578
330	ARTIS 230V	FX010579
331	ARTIS 230V	FX010580
332	ARTIS 230V	FX010581
333	ARTIS 230V	FX010585
334	ARTIS 230V	FX010587
335	ARTIS 230V	FX010589
336	ARTIS 230V	FX010592
337	ARTIS 230V	FX010595
338	ARTIS 230V	FX010597
339	ARTIS 230V	FX010614
340	ARTIS 230V	FX010640
341	ARTIS 230V	FX010878
342	ARTIS 230V	FX010899
343	ARTIS 230V	FX010910
344	ARTIS 230V	FX010911
345	ARTIS 230V	FX010933
346	ARTIS 230V	FX010934
347	ARTIS 230V	FX010937
348	ARTIS 230V	FX010940
349	ARTIS 230V	FX010957
350	ARTIS 230V	FX010959
351	ARTIS 230V	FX011014
352	ARTIS 230V	FX011016
353	ARTIS 230V	FX011017
354	ARTIS 230V	FX011018
355	ARTIS 230V	FX011020
356	ARTIS 230V	FX011022
357	ARTIS 230V	FX011023
358	ARTIS 230V	FX011164
359	ARTIS 230V	FX011169
360	ARTIS 230V	FX011470
361	ARTIS 230V	FX011515
362	ARTIS 230V	FX011651
363	ARTIS 230V	FX011958
364	ARTIS 230V	FX011973
365	ARTIS 230V	FX012160
366	ARTIS 230V	FX012178
367	ARTIS 230V	FX012191
368	ARTIS 230V	FX012206
369	ARTIS 230V	FX012356
370	ARTIS 230V	FX012503
371	ARTIS 230V	FX012558
372	ARTIS 230V	FX012846

Baxter

174	ARTIS 230V	FX008177
175	ARTIS 230V	FX008182
176	ARTIS 230V	FX008183
177	ARTIS 230V	FX008186
178	ARTIS 230V	FX008188
179	ARTIS 230V	FX008192
180	ARTIS 230V	FX008210
181	ARTIS 230V	FX008212
182	ARTIS 230V	FX008213
183	ARTIS 230V	FX008224
184	ARTIS 230V	FX008226
185	ARTIS 230V	FX008227
186	ARTIS 230V	FX008230
187	ARTIS 230V	FX008235
188	ARTIS 230V	FX008238
189	ARTIS 230V	FX008240
190	ARTIS 230V	FX008242
191	ARTIS 230V	FX008244
192	ARTIS 230V	FX008247
193	ARTIS 230V	FX008251
194	ARTIS 230V	FX008252
195	ARTIS 230V	FX008253
196	ARTIS 230V	FX008259
197	ARTIS 230V	FX008263
198	ARTIS 230V	FX008265
199	ARTIS 230V	FX008266

373	ARTIS 230V	FX012900
374	ARTIS 230V	FX012905
375	ARTIS 230V	FX012906
376	ARTIS 230V	FX012908
377	ARTIS 230V	FX012953
378	ARTIS 230V	FX012960
379	ARTIS 230V	FX012963
380	ARTIS 230V	FX012972
381	ARTIS 230V	FX012973
382	ARTIS 230V	FX012979
383	ARTIS 230V	FX012982
384	ARTIS 230V	FX013015
385	ARTIS 230V	FX013017
386	ARTIS 230V	FX013019
387	ARTIS 230V	FX013020
388	ARTIS 230V	FX013021
389	ARTIS 230V	FX013022
390	ARTIS 230V	FX013024
391	ARTIS 230V	FX013025
392	ARTIS 230V	FX013026
393	ARTIS 230V	FX013027
394	ARTIS 230V	FX013028
395	ARTIS 230V	FX013029
396	ARTIS 230V	FX013030
397	ARTIS 230V	FX013031
398	ARTIS 230V	FX013033